

CareFreeSleep®

CPAP Schlauchhaltersysteme für einen unbeschwerten erholsamen Schlaf

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer CareFreeSleep®
CPAP Schlauchhaltersysteme entschieden haben!
Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Dieser CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter wurde mit größter
Sorgfalt in Handarbeit hergestellt um dazu beizutragen, dass Sie mit
einem Gefühl von Sicherheit einschlafen, ohne sich Sorgen um den
unkontrollierten Verlauf des CPAP Atemschlauches machen zu müssen.

Damit Sie auch lange Freude daran haben, lesen Sie die
Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch und beachten Sie alle
Hinweise, um die bestmögliche Funktion des Gerätes zu erreichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen einen
unbeschwerten, gesunden und erholsamen Schlaf.

Ihr CareFreeSleep Team

Montageanleitung CareFreeSleep® Mobile 3D

Lieferumfang:

- 1). 1 Standfuß
- 2). 1 gerader Rundstab
- 3). 3 gerade Rundrohre
- 4). 1 gebogenes Mittelstück
- 5). 1 gebogenes Endstück
- 6). 2 Schlauchhaltehaken für 15 bzw. 22 mm Schlauchsystem
- 7). 2 Senkschrauben für eine optionale Befestigung des Standfußes am Lattenrost

Schritt 1 von 3



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Heben Sie die Matratze Ihres Bettes an und setzen Sie den Standfuß des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters auf den Lattenrost (Bild 1). Setzen Sie die Matratze wieder ab und stecken Sie die einzelnen Teile (Bild 3) wie unten auf den Bildern 4 bis 9 zu sehen ist auf- und ineinander.

Wichtig! Um eine bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu erreichen, platzieren Sie das Gerät im Bereich des Bettkopfteils in einem Abstand von 30 cm von der Außenkante des Bettes entfernt, an dem sich das Therapiegerät befindet (Bild 2).

Bitte beachten Sie dazu auch die Montagezeichnung auf Seite 2.

Bild 4


Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

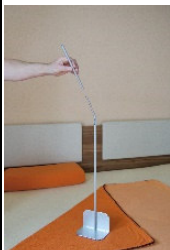

**Rundrohr
draufstecken**

**Rundstab
reinstecken**

**Rundrohr
draufstecken**

**Mittelstück
reinstecken**

**Rundrohr
draufstecken**

**Endstück
reinstecken**

Schritt 2 von 3

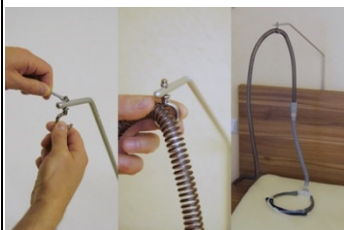


Bild 10

Bild 11

Bild 12

Wählen und montieren Sie am Endstück den passenden Schlauchhaltehaken für Ihr Schlauchsystem (Bild 10) und achten Sie dabei auf einen festen Sitz. Klipsen Sie den Atemschlauch in den Schlauchhaltehaken (Bild 11). Achten Sie dabei auf die Länge des Atemschlauches vom Schlauchhaltehaken bis zur CPAP Maske (Bild 12).

Wichtig! Um eine bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu gewährleisten muss der Außendurchmesser des Atemschlauches mit dem Innendurchmesser des Schlauchhaltehakens übereinstimmen.

Schritt 3 von 3



Bild 13

Prüfen Sie nun den aufgebauten CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter auf Funktion. Die Länge des Atemschlauches sollte für den Schwenkbereich des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters ausreichend vorhanden sein und vom Schlauchhaltehaken bis zur Atemmaske unverändert bleiben (Bild 13).

Wichtig!: Sollte die Länge des Atemschlauches nicht ausreichen, positionieren Sie das Therapiegerät so, dass der Verlauf des Atemschlauches idealerweise dem auf der Montagezeichnung auf Seite 2 entspricht.

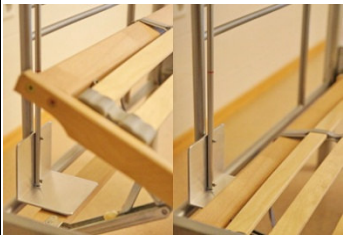


Bild 14


Montagetipp 1:

Wenn Sie einen Lattenrost mit einem verstellbaren Kopfteil besitzen, haben Sie die Möglichkeit den Standfuß des mobilen CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters dazwischen einzuklemmen um eine noch bessere Stabilität zu erreichen (Bild 14).

Montagetipp 2:

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Standfuß mit den zwei mitgelieferten Senkschrauben an dem Lattenrost zu befestigen um die Funktion des verstellbaren Kopfteils weiter zu nutzen.

Montagezeichnung

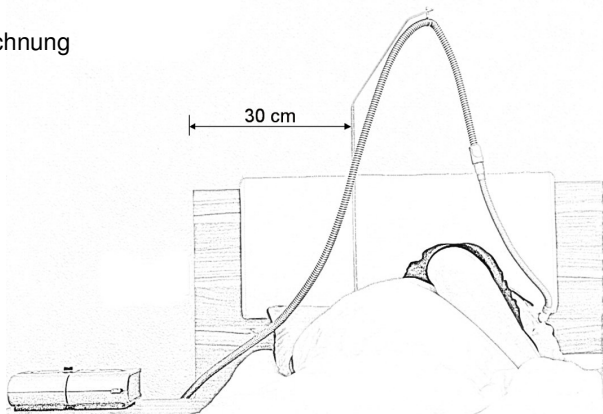

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 3

Wichtige Hinweise:

Bitte benutzen Sie den CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter ausschließlich nur für den dazu bestimmten Zweck.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für Schäden und Fehlfunktionen, welche infolge einer falschen Montage, unsachgemäße Bedienung, eigenwillige Abänderung oder durch zweckfremden Einsatz unseres Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der AGB auf unserer Homepage.

Sollten Sie noch Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

CareFreeSleep

Viktor Lamparter

info@carefreesleep.com

Tel.: 0163 - 1646749 (Täglich ab 17:00 Uhr, außer Sonn- und Feiertage)

www.carefreesleep.com