

# CareFreeSleep®

**CPAP Schlauchhaltersysteme für einen  
unbeschwerten erholsamen Schlaf**

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer CareFreeSleep®  
CPAP Schlauchhaltersysteme entschieden haben!  
Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Dieser CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter wurde mit größter  
Sorgfalt in Handarbeit hergestellt um dazu beizutragen, dass Sie mit  
einem Gefühl von Sicherheit einschlafen, ohne sich Sorgen um den  
unkontrollierten Verlauf des CPAP Atemschlauches machen zu müssen.

Damit Sie auch lange Freude daran haben, lesen Sie die  
Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch und beachten Sie alle  
Hinweise, um die bestmögliche Funktion des Gerätes zu erreichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen einen  
unbeschwerten, gesunden und erholsamen Schlaf.

Ihr CareFreeSleep Team

## Montageanleitung CareFreeSleep® Mobile

### Lieferumfang:

- 1). Schwenkarm
- 2). 2 Schlauchhaltehaken für 15 bzw. 22 mm Schlauchsystem
- 3). Aufnahmerohr mit Hinweisen und Markierungen
- 4). Standfuß mit vormontiertem Aufnahmestab
- 5). Montagematerial für eine optionale stationäre Montage
- 6). 2 Senkschrauben für eine optionale Befestigung des Standfußes am Lattenrost

#### Schritt 1 von 3

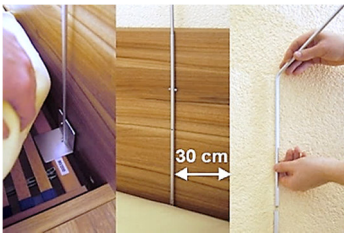


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Klemmen Sie den Standfuß mit dem vormontierten Aufnahmestab zwischen die Matratze und den Lattenrost (Bild 1). Stecken Sie das Aufnahmerohr mit der Markierung „Unten“ auf den Aufnahmestab des Standfußes und danach den Schwenkarm in das Aufnahmerohr (Bild 2 und 3).

**Wichtig!** Um eine bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu erreichen, platzieren Sie das Gerät im Bereich des Bettkopfteils in einem Abstand von 30 cm von der Außenkante des Bettes entfernt, an dem sich das Therapiegerät befindet (Bild 2).

Bitte beachten Sie dazu auch die Montagezeichnung auf Seite 2.

#### Schritt 2 von 3



Bild 4

Bild 5

Bild 6

Wählen und montieren Sie für Ihren Atemschlauch den passenden Schlauchhaltehaken an den Schwenkarm (Bild 4) und achten Sie dabei auf einen festen Sitz. Klipsen Sie den Atemschlauch in den Schlauchhaltehaken (Bild 5). Achten Sie dabei auf die Länge des Atemschlauches vom Schlauchhaltehaken bis zur CPAP Maske (Bild 6).

**Wichtig!** Um eine bestmögliche Funktion des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters zu gewährleisten muss der Außendurchmesser des Atemschlauches mit dem Innendurchmesser des Schlauchhaltehakens übereinstimmen.

#### Schritt 3 von 3

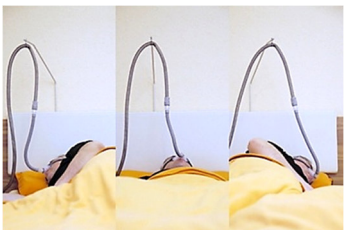


Bild 7

Prüfen Sie nun den aufgebauten CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter auf Funktion. Die Länge des Atemschlauches sollte für den Schwenkbereich des CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters ausreichend vorhanden sein und vom Schlauchhaltehaken bis zur Atemmaske unverändert bleiben (Bild 7).

**Wichtig!** Sollte die Länge des Atemschlauches nicht ausreichen, positionieren Sie das Therapiegerät so, dass der Verlauf des Atemschlauches idealerweise dem auf der Montagezeichnung auf Seite 2 entspricht.

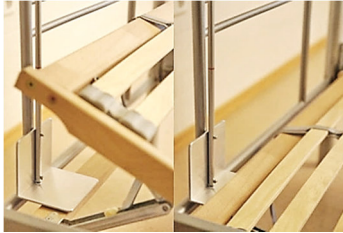


Bild 8

### Montagetipp 1:

Wenn Sie einen Lattenrost mit einem verstellbaren Kopfteil besitzen, haben Sie die Möglichkeit den Standfuß des mobilen CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalters dazwischen einzuklemmen um eine noch bessere Stabilität zu erreichen (Bild 8).

### Montagetipp 2:

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Standfuß mit den zwei mitgelieferten Senkschrauben an dem Lattenrost zu befestigen um die Funktion des verstellbaren Kopfteils weiter zu nutzen.




### Optional:

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit Ihren CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter in der Höhe individuell anzupassen (Standardauslieferung in der höchsten Position).

Entfernen Sie dazu den vormontierten Auflagestift aus dem Aufnahmerohr und setzen Sie ihn in die vorhandene Bohrung weiter unten (Siehe Bild). Dabei rutscht der Schwenkarm mit dem vormontierten Schlauchhaltehaken auf ein vorbestimmtes Maß nach unten.

**Hinweis:** Durch die Demontage des Standfußes bietet der CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter die Möglichkeit für eine stationäre Montage. Benutzen Sie dazu das beigefügte Montagematerial. Die Montageanleitung finden Sie auf unserer Webseite.

Montagezeichnung

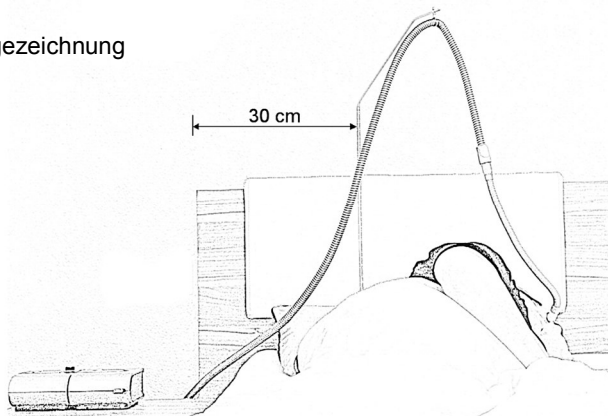

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 3

## **Wichtige Hinweise:**

Bitte benutzen Sie den CareFreeSleep® CPAP Schlauchhalter ausschließlich nur für den dazu bestimmten Zweck.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für Schäden und Fehlfunktionen, welche infolge einer falschen Montage, unsachgemäße Bedienung, eigenwillige Abänderung oder durch zweckfremden Einsatz unseres Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der AGB auf unserer Homepage.

Sollten Sie noch Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**CareFreeSleep**

Viktor Lamparter

info@carefreesleep.com

Tel.: 0163 - 1646749 (Täglich ab 17:00 Uhr, außer Sonn- und Feiertage)

[www.carefreesleep.com](http://www.carefreesleep.com)